

# Tiras Reactivas

# ONETOUCH<sup>®</sup>

# Ultra<sup>®</sup>



0936R2007 SSA

SSA 123300202C5053

## Precisión y exactitud en cada medición

Consulta a tu médico y lee las instrucciones de uso

[www.onetouchla.com](http://www.onetouchla.com)

Síguenos en [f/OneTouch® Diabetes Latinoamerica](#)

Línea de atención sin costo OneTouch<sup>®</sup>

**01 800 5433 557/8**

# ESPECIFICACIONES TIRAS REACTIVAS ONETOUCH® ULTRA®

# ONETOUCH® Ultra®

## INDICACIONES DE USO

Tira de prueba de glucosa en sangre, para usarse con la familia de medidores de glucosa en sangre OneTouch® Ultra®

## DESCRIPCIÓN

**Tira Reactiva para prueba rápida.** Prueba de reactivo seco estándar para glucosa en sangre capilar de reacción extracción, que emplea la enzima glucosa oxidasa altamente específica para la glucosa-D (oxidasa de glucosa). Los glucómetros de la familia OneTouch® Ultra® incorporan esta prueba enzimática con una reacción del medidor químico redox (reducción-oxidación) para generar una corriente eléctrica proporcional a la concentración de glucosa en la muestra de sangre.

La tira reactiva comprende una serie de capas que están dentro de un forro de poliéster o sustrato, este proporciona soporte para los componentes de la tira, mide aprox. 5.5 mm de ancho x 27.5 mm de largo y las capas adyacentes son materiales conductores que habilitan la conexión con el medidor para controlar y medir la reacción electroquímica en la tira.

La capa reactiva (enzimas) contiene dos ingredientes activos, la enzima glucosa oxidasa (*Aspergillus niger*) y el medidor químico redox (ferricianida de potasio), además de otros ingredientes inactivos.


## PRESENTACIONES

Vial de polipropileno con 10 o 25 piezas, en caja de cartón con 1 o 2 viales



### Tecnología OneTouch® DoubleSure®

En cada medición, el sistema exclusivo OneTouch® DoubleSure® de nuestras tiras, mide los niveles de glucosa dos veces con el fin de garantizar el resultado. Así estarás doblemente seguro.

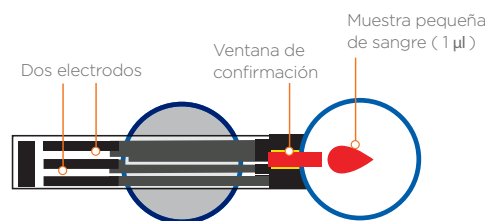

Tiras OneTouch®  
Ultra® C/ 10



Tiras OneTouch®  
Ultra® C/ 25




Tiras OneTouch®  
Ultra® C/ 50

UPC



## PALLET

	10 y 25 Tiras
Productos individuales por corrugado	192
Corrugados por cama	5
Cajas por cama en un pallet o tarima	960
Camas en un pallet o tarima	7

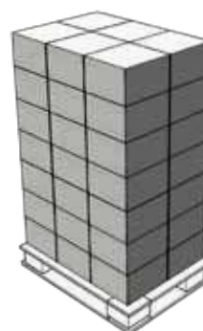

	50 Tiras
	128
	6
	768
	7

